



Snel



Makkelijk



Nauwkeurig

Snelle COVID-19 Screening


Product fabrikant/Frequentie	Nasofaryngeale swab
Sensitiviteit	96,86%
Specificiteit	99,47%
Nauwkeurigheid	98,06%



COVID-19 Antigeen Detectie Kit

Verrichtingsproces & Resultaat interpretatie

1

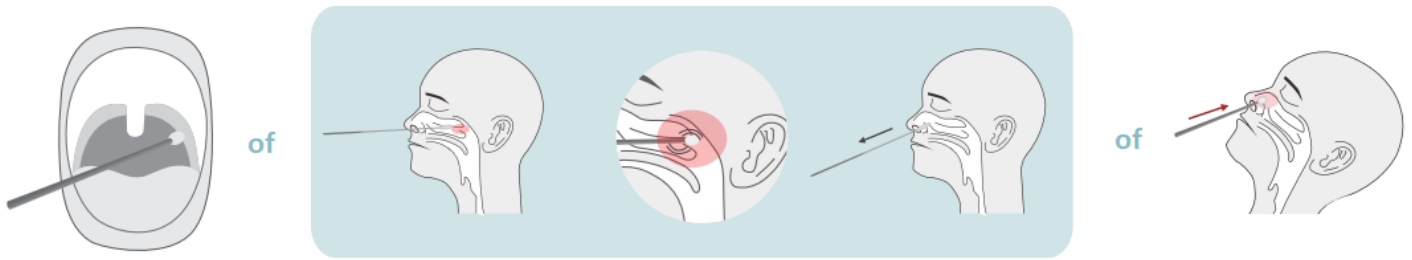


Nasofaryngeale swab afname: steek het wattenstaafje in het neusgat en ga diep in de achterwand van de nasofarynx via de onderste neusholte.

Als u weerstand ondervindt, tilt u het wattenstaafje voorzichtig op totdat het voelt alsof u de wand aanraakt. Nadat het wattenstaafje de neusholte heeft bereikt, wacht u 15 seconden en draait u het vervolgens 3 maal. Draai langzaam om het eruit te halen.

Neusuitstrijk afname: draai voorzichtig en duw het in de neusholte, druk het wattenstaafje 3 maal op de neuswand en haal het er dan uit.

Orofarygeale swab afname: Verzamel tegen de achterwand van de keelholte of beide zijden van de amandelen. Raak de tong niet aan.


2

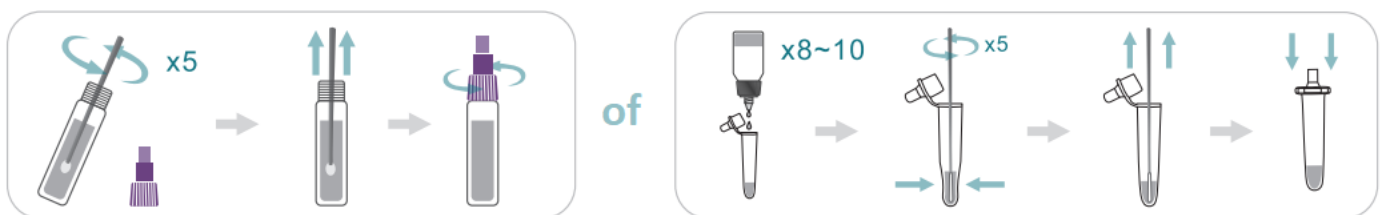

Steek het wattenstaafje in de extractiebuffer. Roer hiermee minimaal 5 keer en knijp in het wattenstaafje om het monster te laten overlopen. Haal het wattenstaafje eruit en draai de dop erop.


Voeg 8~10 druppels buffer in de extractiebuis. Roer het wattenstaafje minimaal 5 keer en knijp in het wattenstaafje om het monster te laten overlopen. Haal het wattenstaafje eruit en druk de dop erop.

3

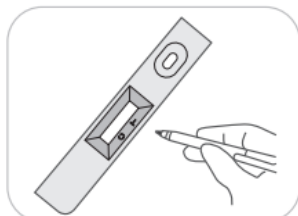


Open het aluminiumfolie, neem de testkaart eruit en markeer.

4

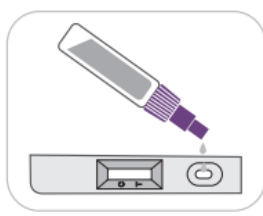


Voeg 60µL (ongeveer 2 druppels) van het onttrokken monster toe aan de monsterholte.

5

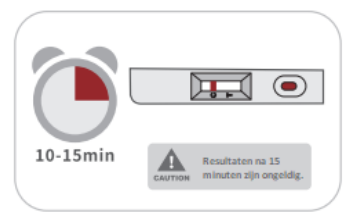

Lees de resultaten af binnen 10 tot 15 minuten.

Resultaat interpretatie

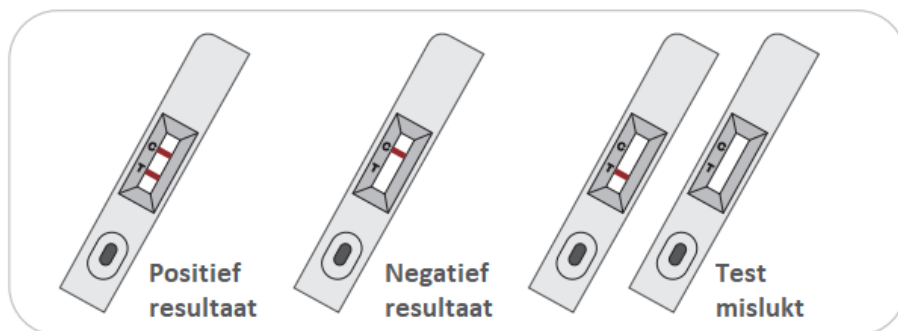

Opslagcondities & houdbaarheid

De originele verpakking moet donker en droog opgeslagen worden op 4-30°C. Houdbaarheid is 24 maanden. De testkaart moet binnen 1 uur na opening van het aluminiumfolie gebruikt worden.

Productcomponenten & specificaties

Testkaart, extractiebuffer, swab, instructies voor gebruik, 25 testen/kit, 5 testen/kit, 1 test/kit

Goffin Molecular Technologies

Industrieweg 24C, 4153 BW Beesd, the Netherlands

e: info@goffinmt.com

t: (+31) 345 712 070

